



25 דצמבר, 2011

לקוחות נכבדים,

**הנדון: ערכה חדשה לבדיקת HIT**

לאחרונה, חברת IL השיקה ערכה חדשה לבדיקת HIT (Heparin Induced Thrombocytopenia). כידוע, HIT יכול להופיע בעקבות נוגדנים עצמוניים (Anti-PF4-H) אשר נוצרים בעקבות טיפול בהפרין וגורמים באופן פרדוקסלי, להפעלת הטסיות וליצירת קרישי דם.


הבדיקה מבוצעות בצורה אוטומטית על מכשירי ה-ACL TOP Family והתוצאה מתקבלת תוך כ-10 דקות.

התוצאה המתקבלת הינה כמותית, ולא נדרשת אינטרפרטציה בידי המפעיל וזאת בעקבות ערך ה-cut off הקיים לבדיקה זו. הערכה מוכנה לשימוש, ללא צורך בהמסה.

כמו כן לבדיקה זו בקרת איכות ייעודית בעלת שני ערכים האחד חיובי והשני שלילי.

**להלן עיקרון הבדיקה:**

הבדיקה מבוססת על חלקיקי Latex המצופים בנוגדנים מונוקלונליים כנגד PF4-H. הבדיקה הינה תחרותית (בין הדגימה וחלקיקי הלטקס) התוצאה היא ביחס הפוך בין מידת האגלוטינציה לבין ריכוז הנוגדנים בדגימה.

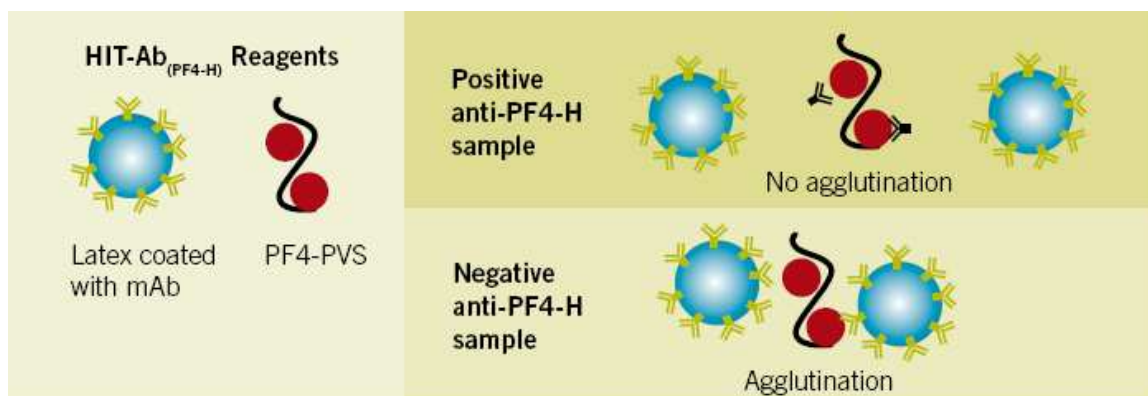

במבחן התוצאה - אילקס



המקטים להזמנה:

מק"ט	תיאור ערכה
1-203012-00	HIT-AB Kit
1-200132-00	HIT-AB Control

להצעות מחיר ניתן לפנות למזכירת המחלקה אוסי שליט 03-938-5535

בברכה,

אסף נחמני  
מנהל מוצר קרישה  
אילקס מדיקל בע"מ  
054 5686323